

**Bellovac<sup>®</sup>**  
**Exudrain<sup>®</sup>**  
**Abdovac<sup>®</sup>**

Drénkészletek



**Sebdrenáló készletek  
teljes választéka  
különböző igények  
kielégítésére**



Különböző sebészeti beavatkozásokhoz különböző drénekre van szükség.

## Könnyen kezelhető drének



A Medioplast drénjei biztonságosak, könnyen kezelhetők és jól áttekinthetőek.

### Használatuk egyszerű

A Medioplast alacsony vákuumú drénjeit nagyon egyszerű használni. Nincs szükség drága eszközök megvásárlására, vagy különlegesen kiképzett személyzetre.

A szívóharangok, valamint azok bemeneti és kimeneti oldalánál található egyirányú szeleppel könnyű kezelést tesznek lehetővé és folyamatosan időt takarítanak meg a kezelő személyzet számára. Kompletten, sterilen kerülnek forgalomba.

### Széleskörű választék a különböző igények kielégítésére

A Medioplast drénválasztékát a különböző sebészeti beavatkozások igényeihez igazították, hogy optimalizálják a zökkenőmentes és gyors gyógyulás lehetőségét. Mindegyik szett más tulajdonságokkal rendelkezik. Termékválasztékunkban mindig megtalálható egy olyan drén, amely az Ön igényeit kielégíti, legyen szó akár volumenkapacitásról vagy szívóhatásról.


# Felhasználóbarát drénrendszer

## Drenálás alacsony nyomáson

Miért ne választaná az alacsony vákuumos drenálást? Az alacsony vákuummal rendelkező drénnek – amilyen a Mediplast rendszere – valóban sok előnye van.

- Hatékony szívás<sup>1</sup>
- Kevesebb vérveszteség<sup>2</sup>
- Jobb drenálás<sup>3</sup>
- A drén hamarabb eltávolítható<sup>4</sup>
- Kevésbé szívja be a szöveteket<sup>5</sup>

Ha túl nagy vákuumot alkalmaznak, szöveteket és kisebb ereket szívhatnak be a drénbe, amellyel fokozott vérveszteséget és a beteg számára kellemetlenséget okoznak. A Mediplast alacsony vákuumos drénjének segítségével igen hatékony a drenálás, de jóval kevesebb a probléma.<sup>6</sup>

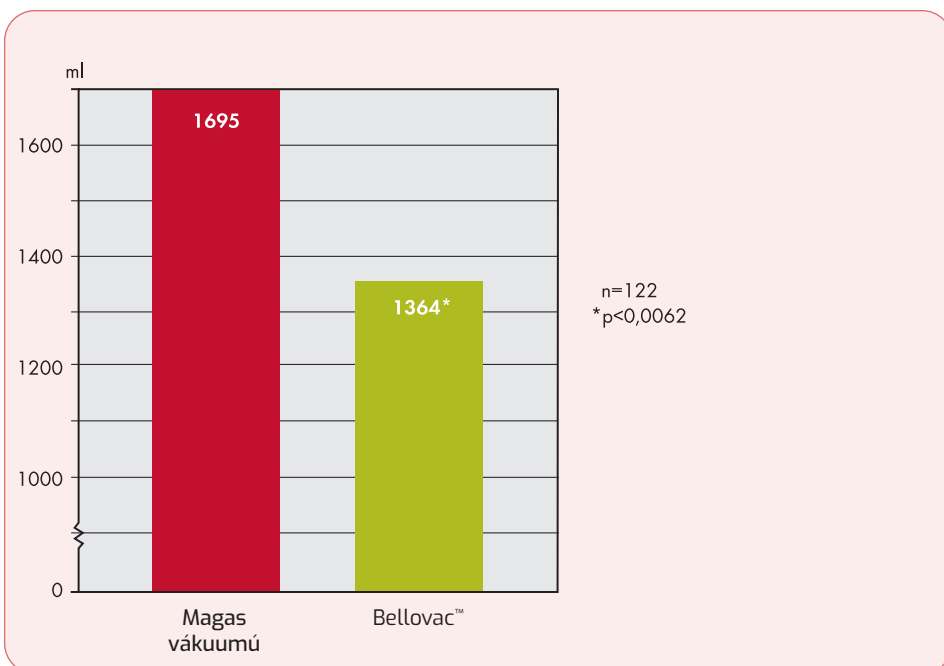


Kevesebb vérveszteség a Bellovac révén.<sup>2</sup>

## Előnyös a beteg és a személyzet számára egyaránt

A Mediplast drének teljesen zárt rendszert alkotnak, így jelentősen lecsökken a posztoperatív fertőzések kockázata és a kórházi tartózkodás ideje.

- A drenált folyadék a zárt rendszeren belül marad.
- A szívóharangban és a gyűjtőzsákban egyirányú szelepek vannak.
- Az egész rendszeren belül biztonságos minden csatlakozás.
- A beteg és a személyzet kontaminációjának minimálisra csökken a kockázata<sup>7</sup>.
- A drének használata elősegíti a színvonalas betegellátást és ápolást<sup>7</sup>.

A fenti tények alátámasztják, milyen sok előnnyel jár az alacsony vákuumos drenálás a beteg számára: kisebb a fájdalom, gyorsabb a sebgyógyulás és kevesebb napot kell kórházban tölteni. Ugye valóban felhasználóbarát megoldás?

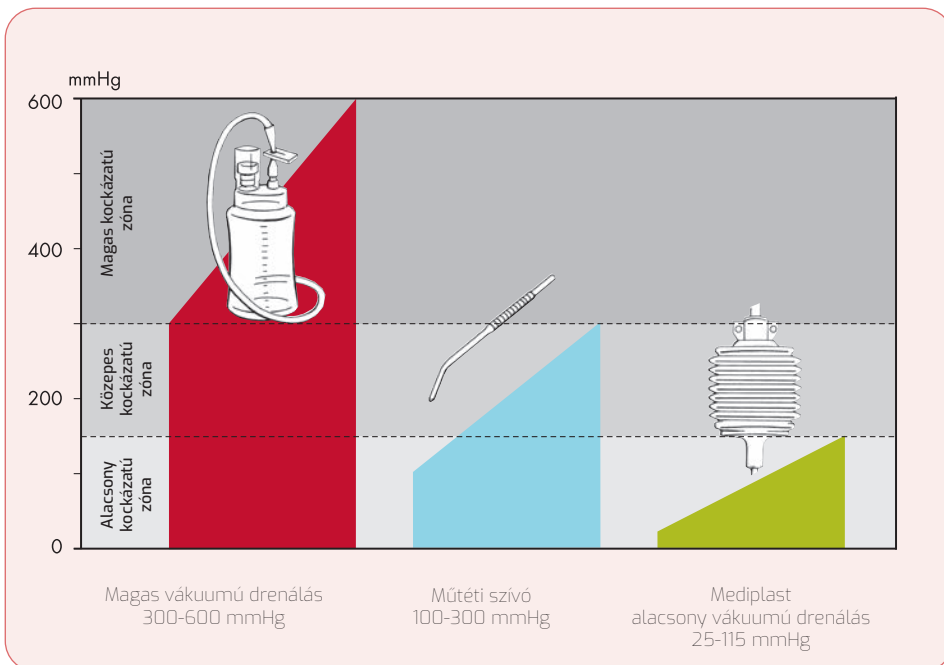

A magas vákuum – mint ami pl. az előre vákuumozott palackban van – szöveteket szívhat be a drénbe. A műteti szívónál ennek a kockázata jóval kisebb.


## Bellovac®



## Exudrain®



## Exudrain® Mini

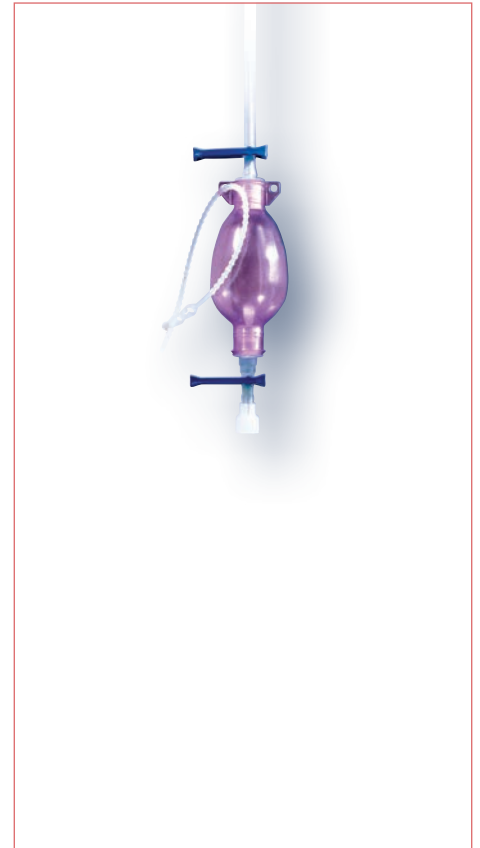

### Nagy volumenű drénkészlet

Max. szívási érték: **115 mmHg/15 kPa**  
Szívóharang volumene: **220 ml**  
Zsák volumene: **700 ml**

#### Alkalmazási terület:

Orthopédia  
Nőgyógyászat  
Általános sebészet

Rend. szám	Megnevezés
68390 2x15	Bellovac® szett FG 10
68391 2x15	Bellovac® szett FG 14
68392 2x15	Bellovac® szett FG 18
68393 2x15	Bellovac® szett FG 10, nyárssal
68394 2x15	Bellovac® szett FG 14, nyárssal
68395 2x15	Bellovac® szett FG 18, nyárssal

### Közepesvolumenű drénkészlet

Max. szívási érték: **75 mmHg/10 kPa**  
Szívóharang volumene: **110 ml**  
Zsák volumene: **700 ml**

#### Alkalmazási terület:

Általános sebészet  
Emlőműtét ill. mastectomia  
In situ sebdrénálás

Rend. szám	Megnevezés
68406 3x10	Exudrain® szett FG 10
68407 3x10	Exudrain® szett FG 14
68408 3x10	Exudrain® szett FG 18
68409 3x10	Exudrain® szett FG 10, nyárssal
68410 3x10	Exudrain® szett FG 14, nyárssal
68411 3x10	Exudrain® szett FG 18, nyárssal
68428 3x10	Exudrain® Passzív FG 10
68425 3x10	Exudrain® Passzív FG 14

### Kis volumenű drénkészlet

Max. szívási érték: **75 mmHg/10 kPa**  
Szívóharang volumene: **110 ml**

#### Alkalmazási terület:

Kézsebészet  
Biopszia  
Egynapos sebészet

Rend. szám	Megnevezés
68412 3x10	Exudrain® Mini szett FG 8
68419 3x10	Exudrain® Mini szett FG 8, nyárssal

# Abdovac®



## Kíméletes szívóhatással rendelkező drén

Max. szívási érték: 25 mmHg/3,3 kPa

Szívóharang volumene: 110 ml

Zsák volumene: 700 ml

## Alkalmazási terület:

Hasi sebészet

Rend.szám	Megnevezés
68413 3x10	Abdovac® szett FG 10
68414 3x10	Abdovac® szett FG 14
68415 3x10	Abdovac® szett FG 18
68416 3x10	Abdovac® szett FG 10, nyárssal
68417 3x10	Abdovac® szett FG 14, nyárssal
68418 3x10	Abdovac® szett FG 18, nyárssal

# Tartozékok

## DRÉNZSÁKOK

Rend.szám	Megnevezés
68337 12x50	Drénzsák
68480 4x25	Steril drénzsák

## Y ELOSZTÓK

Rend.szám	Megnevezés
68376 4x25	Y elosztó FG10 katéterrel
68377 4x25	Y elosztó FG14 katéterrel
68378 4x25	Y elosztó FG18 katéterrel
68385 4x25	Y elosztó FG10 katéterrel, nyárssal
68386 4x25	Y elosztó FG14 katéterrel, nyárssal
68387 4x25	Y elosztó FG18 katéterrel, nyárssal

## SZILIKON DRÉNEK

Rend.szám	Megnevezés
68367 4x15	Kerek dréncső FG 10,nyárssal
68368 4x15	Kerek dréncső FG 14,nyárssal
68369 4x15	Kerek dréncső FG 18,nyárssal
68361 4x15	Lapos dréncső FG 14,7 mm; nyárssal
68362 4x15	Lapos dréncső FG 14,10 mm; nyárssal

## HORNYOS DRÉN

Rend.szám	Megnevezés
68460 4x15	Kerek hornyos drén FG 10, nyárssal
68461 4x15	Kerek hornyos drén FG 14, nyárssal
68462 4x15	Kerek hornyos drén FG 18, nyárssal
68463 4x15	Lapos hornyos drén FG 14; 7 mm; nyárssal
68464 4x15	Lapos hornyos drén FG 14; 10 mm; nyárssal

## Referenciák

1. Loder P, Smith G et al. Aust. NZJ Surg 1987;57:531-5.
2. Morgan-Jones RL, Perko MMJ, Cross M. The Knee 2000;7:149-50.
3. Giordano G, Abib A. Presented as a poster at Chirurgie de la Hanche – Hip Surgery Developments & Future prospects, Sep 1999.
4. Van Heurn LWE, Brink PRG. Br J Surg1995;82:931-2.
5. Gerngoss H, Marquardt K. Chirurg1992;63:447-53.
6. Seely MF. Br J Surg 1979;66:657-9.
7. Zerbe M, Mc Ardie A, Goldrick B. Am J Infect Control 1996;24(5):346-52.

**Bellovac<sup>®</sup>****Exudrain<sup>®</sup>****Abdovac<sup>®</sup>****Drénkészletek**

A **Mediplast** egy olyan koncepciót takar, amely a termékekkel együtt átfogó segítséget és oktatást nyújt. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan elsőosztályú termékeket ajánlhatunk, amelyek kiállták az alapos tesztek és könnyen használhatók. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen, a drénkészletekkel kapcsolatos kérdésben. Örömeinkre szolgál, ha segítségére lehetünk.

**DISTRIBUTOR**

Dispomedic Kft, 1105 Budapest, Gitár u.15.

Tel: (1) 262-4227, 20/9414-688, Fax: (1) 262-4227, E-mail: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu)