



Medena®

Fejlett szívási technológia

Komplett szívókészletek
szakszerű sebészeti
beavatkozásokhoz

- Nem rántja be a szöveteket
- Nincs dugulás a szívóeszközben
- Egyenletesen magas szívókapacitás
- Atraumatikus szívás
- Jól látható
- Szilárd és mégis rugalmas



Ezek azok a követelmények, amelyeket egy jó szívóval szemben lehet támasztani. Ebben mindenkinek megegyezik a véleménye. A nézetek csak a szívófej kialakításában térnek el, amellyel ezt a minőségi követelményt el lehet érni. Ezért a Medena a legszélesebb termékkört nyújtja a nagyteljesítményű szívókból. Ezeken belül is két fő típusra koncentrál: a Slit-Tip-re (Vállfors) és a Maxi-ra (kettős lumenű).

Slit Tip (hasított végű fej) – Vállfors

A Slit Tip kifejlesztése széleskörű gyakorlati és elméleti tanulmányokon alapszik.^{1,2} Az ezen a szívófejen található három hasíték biztosítja, hogy a szívófej a seb aljának támaszkodjon, csökkentve ezáltal a szövet beszívás kockázatát. A szívás maga elsődlegesen oldalirányú, amely tiszta és áttekinthető műtéti területet biztosít. A Slit Tip szívók nyelét könnyen és biztonságosan lehet tartani, amely így precíz munkát tesz lehetővé. A szívófejek fehér színűek, amelyek a sebben jobban láthatók, mint az átlátszó szívók.

Szívófej három hasítékkal

- ✓ minimálisan csökkenti a szövetek beszívását
- ✓ egyenletesen magas szívókapacitást biztosít
- ✓ jól áttekinthető műtéti területet biztosít

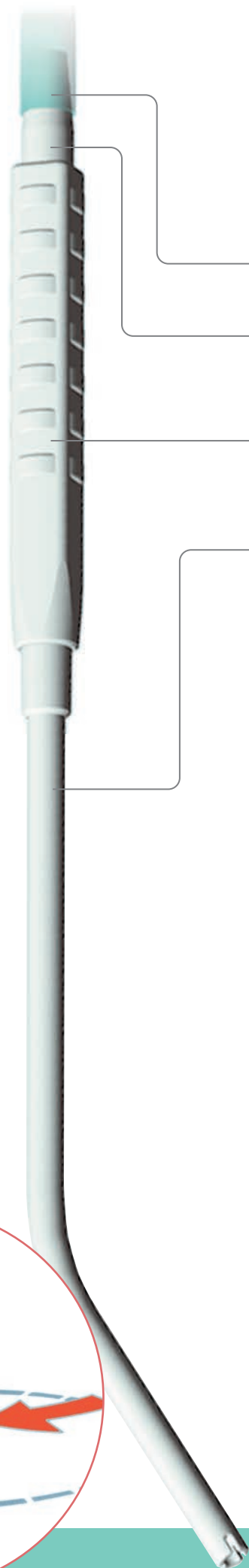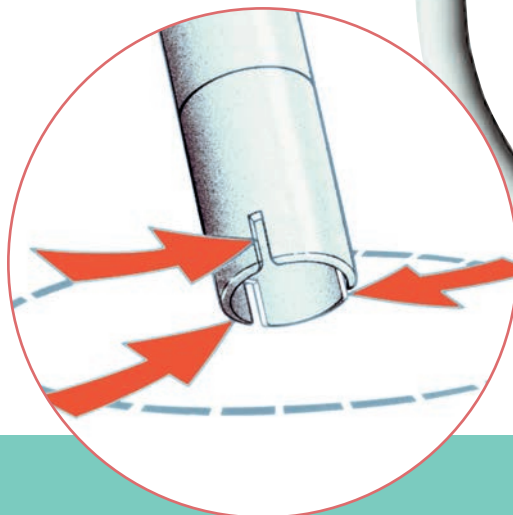


Stabil cső
nem csuklik össze

Nincs belső szűkület
a jó áramlás minimálisan csökkenti az elzáródást

Könnyen kezelhető fogó
stabil és jól kezelhető

Fehér szívófej
jól látható a seb mélyén is

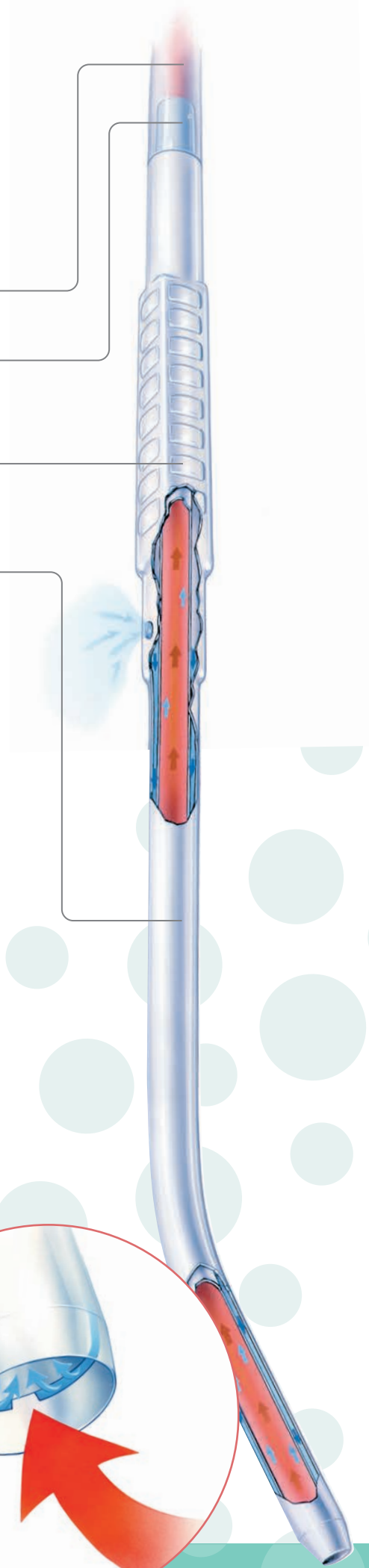

Maxi és Maxett

A Maxi szívóknál a nagy szívási kapacitás az atraumatikus folyadék elszívással kombinálódik. A titok a kettős csőben rejlik. Nyitott állapotban lévő szíváserősség szabályozóval ez a szívó olyan teljesítményt nyújt, mint a standard szívóeszközök zárt szíváserősség szabályozóval. A szívófej végénél a negatív nyomás 20 mmHg, amellyel a szívás teljesen atraumatikus. Zárt szíváserősség szabályozóval a szívás kapacitása fokozódik.

Kettős lumen

- ✓ kíméletes szívóhatás
- ✓ kevésbé rántja be a szöveteket
- ✓ nagy szívási kapacitás



A beteg legjobb ellátása – és a legjobb orvosi ellátás

A szívóeszközök azoknak a termékeknek a nagy csoportjához tartoznak, amelyek fontosak, ám mégis alig vonják magukra a figyelmet. Működésük – jó működésük – a legfontosabb.

Egy sebészeti szívó eszköz legyen könnyen kezelhető, ne idézzon elő eltömődést, feltorlódást és egyéb problémákat. Ugyanakkor biztosítani kell a szükséges szívóerőt anélkül, hogy berántaná a szöveteket. Ezen felül úgy kellett kialakítani, hogy a sebészeti terület könnyen hozzáférhető, tiszta, jól látható legyen.

Az ilyen szívóeszközök nem csak a betegnek jók, de a műtétet végző személyzetnek is, akiknek első osztályú munkát kell végezniük. Ez azt jelenti, hogy eszközök tekintetében is minőségi orvosi ellátást kell biztosítani.

A Medena termékek konstrukcióját sok éves klinikai tapasztalat és intenzív tesztelés alapján alakították ki. A gyártást is a minőségen és a higiénian alapuló gondolkodás jellemzi.

A termékválaszték mind általánosan használt, mind pedig speciális típusokat is tartalmaz, hogy minden igényt kielégíthessenek.



A következő oldalak a Medena szívóeszközöket mutatják be, amelyek számos típusban és modellben rendelhetők; komplett szettben vagy egyedi elemek szerint.

Elemek

Nincs belső „váll”. A szívófej és a cső közötti csatlakozást úgy tervezték, hogy a lehető legkisebb turbulencia keletkezzen a csőben.

Az extra hosszú cső csökkenti az extra csőcsatlakozás szükségességét.

A csatlakozót úgy tervezték, hogy csökkentse a szívótartályhoz történő csatlakozási pont turbulencia kockázatát.

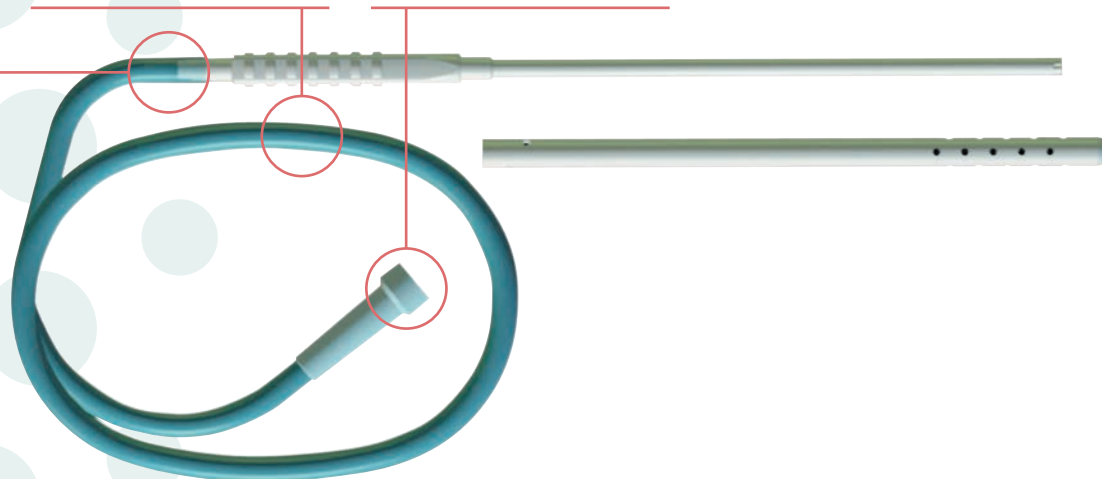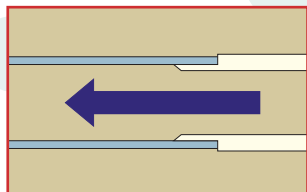

Termékválaszték




Szívóeszközök/Szívókészletek

Slit Tip (Vällfors) – hasított végű	1
Maxi	2
Special.....	3-5
Yankauer	6
Szívófejek.....	7

Csővek/csőkészletek

Csőkészletek	8
--------------------	---

Index.....	9
------------	---

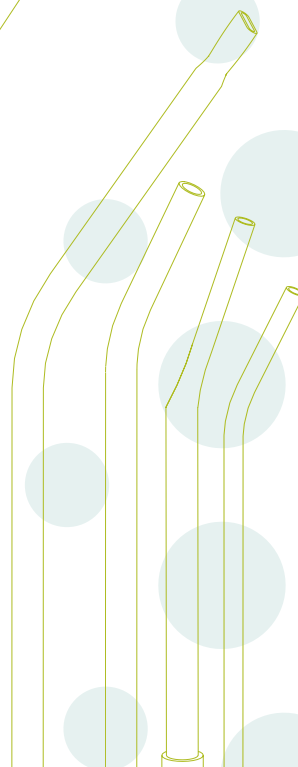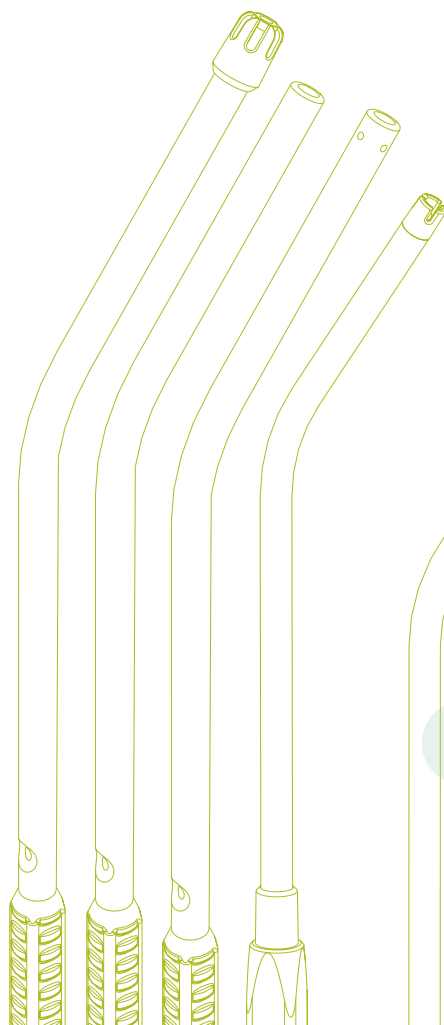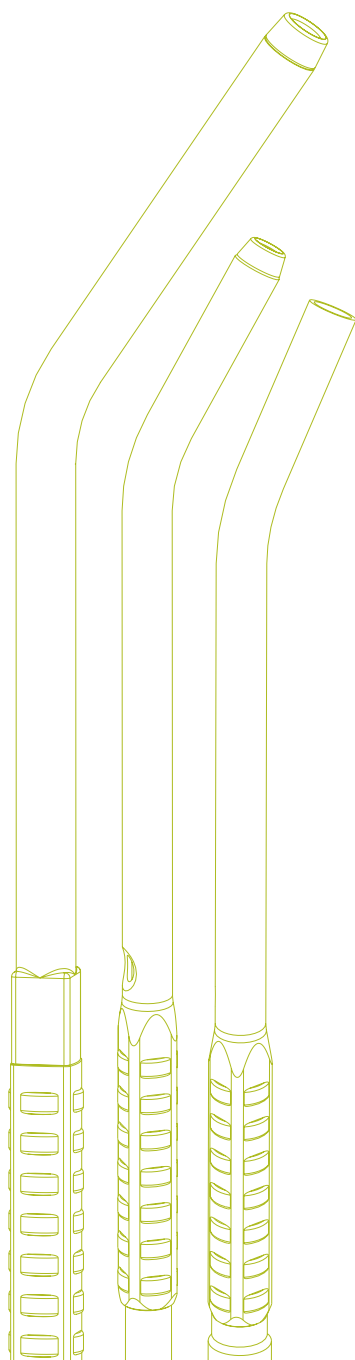

Szívófej típusok

Slit Tip (Vällfors)
hasított végű



Maxi



Standard
kerek nyílású



Csúcsos végű



Lapított végű



Négy lyukkal
ellátott



Üreges végű






Poole/Rissler



Ref.	Műtéti szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68142	5x6,2 mm	31 cm	—	—	—	100
68145				5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68146					3,5 m	2x30

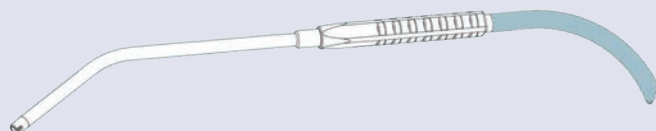


Midi



Ref.	Műtéti szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68132	5x6,2 mm	26 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68133					3,5 m	2x35

Szívófej három hasítékkal

- minimálisra csökkenti a szövetek beszívását
- egyenletesen magas szíváskapacitást biztosít
- jól áttekinthető műtéti területet biztosít

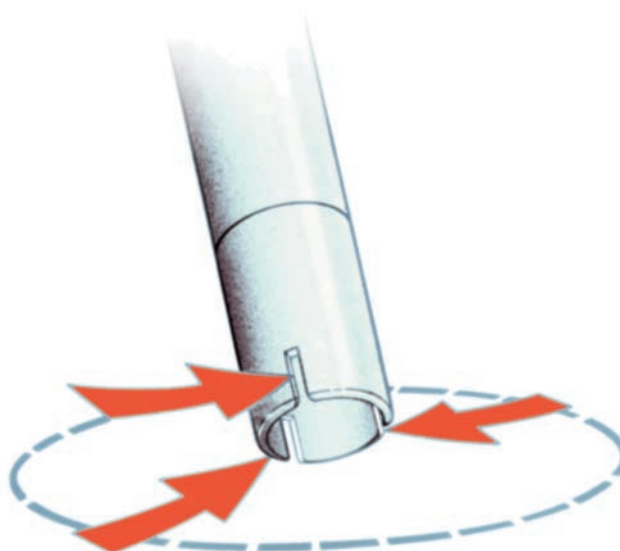




Maxette



Ref.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68176	5x10 mm	27 cm	igen	5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68177					3,5 m	2x30

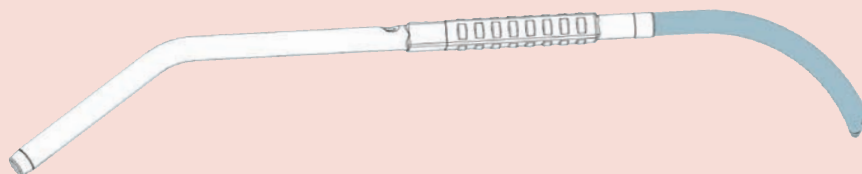


Maxi




Ref.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68171	7x11,6 mm	33 cm	igen	7,8x10,7 mm	2,0 m	2x30
68172					3,5 m	2x20

Kettős lumen

- kíméletes szívóhatás
- kevésbé rántja be a szöveteket
- nagy szívási kapacitás

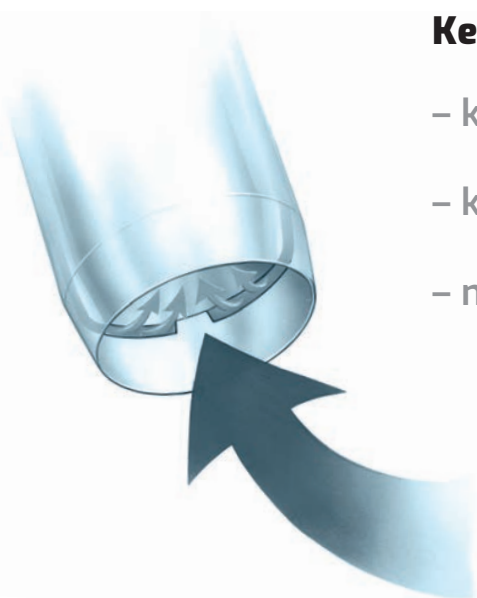

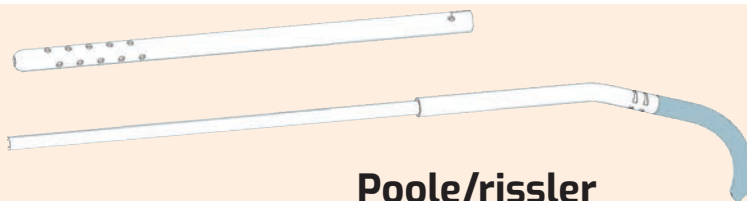
Poole/rissler


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68100	4x6,2 mm	33 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x45
68107					3,5 m	2x30
68119			igen		2,0 m	2x45


Lapított végű


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68103	5x6,2 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68128					3,5 m	2x35


Lapított végű átlátszó


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68105	4,1x5,8 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50


Csúcsos végű


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68104	5x6,2 mm	21 cm	igen	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68129					3,5 m	2x35


Csúcsos végű - mini


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68110	5x6,2 mm	12 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68131					3,5 m	2x35



Kétszeresen hajlított



Rend. sz.	Műtési szívak			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68102	5x6,2 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68113					3,5 m	2x35



Kétszeresen hajlított



Rend. sz.	Műtési szívak			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68120	5x6,2 mm	17 cm	—	—	—	100
68112				5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Kétszeresen hajlított



Rend. sz.	Műtési szívak			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68126	3x4,0 mm	17 cm	—	—	—	100
68118				5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68209					3,5 m	2x35



Szívó rectoscophoz



Rend. sz.	Műtési szívak			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68152	5x6,2 mm	40 (47) cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x45



Vaginális öblítőcső




Rend. sz.	Műtési szívak			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68159	8x10 mm	22 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50


Mega hajlított


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68285	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	2,0 m	2x35


Mega hajlított


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68287	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	2,0 m	2x35

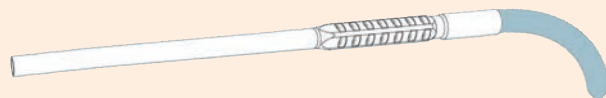
Mega egyenes


Rend. sz.	Műtési szivók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68295	8x10 mm	25 cm	—	7,3x10 mm	3,5 m	2x30



Üreges végű



Rend. sz.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68256	4x6 mm	25 cm	igen	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Üreges végű kétszeresen hajlított




Rend. sz.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68155	4x6 mm	17 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Négy oldalnyílással



Rend. sz.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68258	4x6 mm	25 cm	igen	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68259			—			

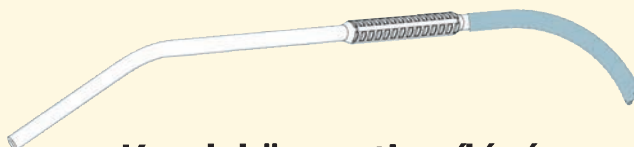

Kerek központi nyílású



Rend. sz.	Műtési szívók			Cső		Mennyiség
	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Ø	Hossz	
68261	4x6 mm	25 cm	—	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Poole/rissler



	Rend. sz.	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Mennyiség
POOLE/RISSLER	68142	5x6,2 mm	31 cm	—	100



Kétszeresen hajlított – vastag



Kétszeresen hajlított – vékony



Fül-orr-gégészeti/fogászati



Szívócsövek



	Rend. sz.	Ø	Hossz	Szívás szabályozó	Mennyiség
KÉTSZERESEN HAJLÍTOTT – VASTAG	68120	5x6,2 mm	17 cm	—	100
KÉTSZERESEN HAJLÍTOTT – VASTAG	68126	3x4 mm			
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI/FOGÁSZATI	68124	2x3 mm			
	68125	2,5x3,5 mm			

	Rend. sz.	Elülső vége	Hátsó vége	Ø	Hossz	Mennyiség
SZÍVÓCSÖVEK	68108	Rugalmas csatlakozással	Kónuszos	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
	68130				3,5 m	2x35



Szívócső

Rend. sz.	Elülső vége	Hátsó vége	Ø	Hossz	Mennyiség
68121	Kerek végű	Kónuszos	5,5x8 mm	2,0 m	2x50



Csatlakozókészlet

Rend. sz.	Elülső vége	Hátsó vége	Ø	Hossz	Mennyiség
68167	Kónuszos	Kónuszos	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68115				3,5 m	2x35

Extra puha



Standard

Sebészeti szívócső

Rend. sz.	Elülső vége	Hátsó vége	Ø	Hossz	Mennyiség
68157	Kerek végű		6x8,6 mm	1,0 m	2x20
		Kerek végű	9,7x13,5 mm	2,5 m	



Szívócső

Rend. sz.	Elülső vége	Hátsó vége	Ø	Hossz	Mennyiség
68106	Csatlakozócsonk	Kónuszos	5,5x8 mm	2,0 m	2x50
68114				3,5 m	2x35
68207	Csatlakozócsonk szíváserősség szabályozóval			2,0 m	2x50

Ref.	oldal	Ajánlott keresztreferenciák
68100.....	3	Általános sebészet.....68146, 68133, 68172, 68177, 68107, 68113, 68128, 68129
68102.....	4	
68103.....	3	Ortopédia68285, 68287, 68295, 68133, 68177, 68172, 68113, 68128, 68129, 68131
68104.....	3	
68105.....	3	
68106.....	8	Nőgyógyászati / urológiai sebészet68133, 68172, 68107
68107.....	3	
68108.....	7	Plasztikai sebészet 68133, 68131
68110.....	3	Érsebészet..... 68133, 68177, 68172, 68128, 68129, 68131
68112.....	4	
68113.....	4	
68114.....	8	Mellkasi sebészet.....68146, 68172
68115.....	8	Fül-orr-gégészet 68131, 68209, 68120/68124/ 68125/68126+68130
68118.....	4	
68119.....	3	
68120.....	4, 7	Fogászat / szájszészet..... 68131, 68120/68124/ 68125/68126+68130
68121.....	8	
68124.....	7	
68125.....	7	
68126.....	4, 7	
68128.....	3	
68129.....	3	
68130.....	7	
68131.....	3	
68132.....	1	
68133.....	1	
68142.....	1, 7	
68145.....	1	
68146.....	1	
68152.....	4	
68155.....	6	
68157.....	8	
68159.....	4	
68167.....	8	
68171.....	2	
68172.....	2	
68176.....	2	
68177.....	2	
68207.....	8	
68209.....	4	
68256.....	6	
68258.....	6	
68259.....	6	
68261.....	6	
68285.....	5	
68287.....	5	
68295.....	5	

Leírás

Alkalmazás

A Medena szívók a legtöbb sebészeti beavatkozáshoz pl. általános sebészeti, érsebészeti, plasztikai sebészeti, fogászati, szájsebészeti, ortopédiai, nőgyógyászati, urológiai és rectoscopos beavatkozásokhoz alkalmazhatók.

Anyag


A szívófejek, csövek, csatlakozók és más komponensek PVC-ből készülnek.

Csomagolás

Mind a komplett szívó szettek, mind pedig egyedi komponensei sterilen, kettős csomagolásban – egy belső műanyag zacskóban és egy külső "peel open" tasakban – kerülnek forgalomba. A külső "peel open" tasak egyik oldalán átlátszó műanyag, másik oldalán pedig papír, amelyen a termék összes azonosító adata szerepel. A papírt különleges bevonat fedi, amely biztosítja a légmentességet, és szálmintesen nyílik. Ezeket a tasakokat hullámosított kartonból készült dobozba (575x385x410) csomagolják, amelyet egy egyszerű tépőmechanizmussal lehet kinyitni, hogy a tasak illetve a termék sérülésének kockázata minimális legyen.


Sterilizálás

A Mediplast cég a termékeit a 14001:2015 és ISO 13485:2016 minőségbiztosítási rendszerrel összhangban állítja elő. A termékeket etilén-oxiddal elősterilizálják.

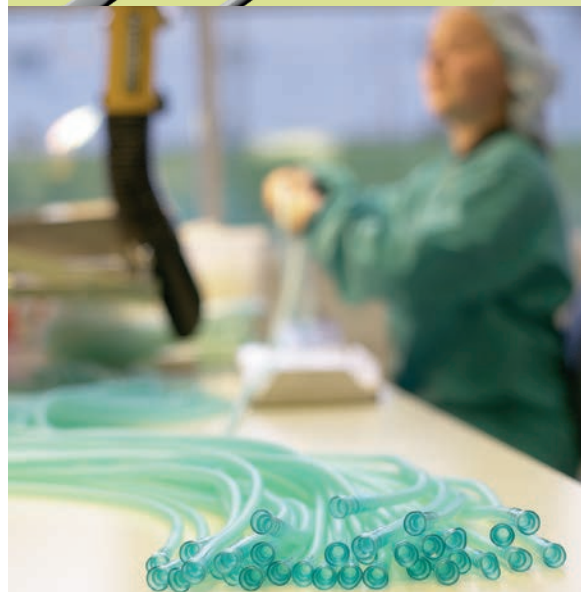

Referenciák

1. Vallfors, B., Abstract: Optimal suction system for dissection work in surgery. Acta Chir Scand, 1976. 142(1): p. 94-6.
2. Laabs, W.A. and H.G. Appel, Atraumatic aspirators. Chirurgische Praxis, 2002. 59(3): p. 373-379. In German
3. Ray, C.D. and R. Levinson, Abstract: Noise pollution in the operating room: a hazard to surgeons, personnel, and patients. J Spinal Disord, 1992. 5(4): p. 485-8.
4. Azizi, J., et al. Abstract, Uphill grime: process improvement in surgical instrument cleaning. Aorn j, 2012. 96(2): p. 152-62.
5. Robinson, A.H., et al., Suction tip contamination in the ultraclean-air operating theatre. Ann R Coll Surg Engl, 1993. 75(4): p. 254-6.
6. Woodey, R., et al., Correspondence: A dangerous problem with plastic Yankauer suckers. Anaesth Intensive Care, 1995. 23(4): p. 519-20.

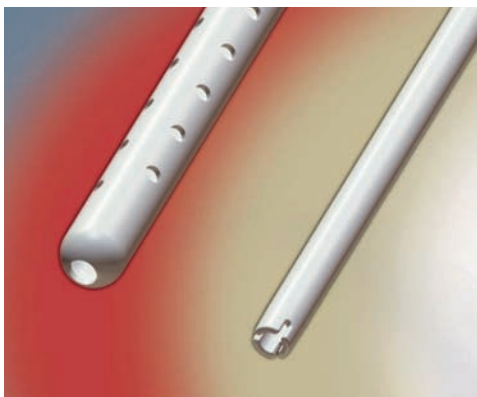

Fejlett szívóeszközök

A Medena műtéti szívóeszközök termék-palettája széles, de ugyanakkor specializált is, azért hogy valamennyi atraumatikus folyadék elszíváshoz, bármilyen sebészeti eljáráshoz megfelelő legyen. A termékpaletta magába foglal szívófejeket és csöveket valamint komplett, használatra kész szívókészleteket is. Különböző kialakítású szívófejek kaphatók, így a Medena megoldást nyújt valamennyi sebészeti beavatkozáshoz, függetlenül attól, hogy Ön a hasított végű Slit Tip (Vällfors) vagy a Maxi (kettős lumenű) eszközt részesíti előnyben. A választék számos speciális terméket is tartalmaz.

A nagy teljesítményű atraumatikus váladék szívó Medena termékeket büszkén szállítja Önnek a Mediplast. A Mediplast hangsúlyt fektet az olyan termékekre, amelyekkel a betegek első osztályú ellátást kapnak, és amelyek ezzel egy időben kiváló eszközt biztosítanak a felhasználók számára.

Forgalmazza
Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u. 15.

Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785

E-mail: info@dispomedic.hu



Web: www.dispomedic.hu