

KilRoid[®]

Egyszerhasználatos haemorrhoid szívó ligátor

- Kényelmes
- Időt takaríthat meg
- Nem szükséges hozzá asszisztencia
- Higiénikus
- Latexmentes gumigyűrűk

Különleges feltöltési technika




KilRoid®

Mindig használatra kész

A KilRoid egy olyan egyszerűhasználatos haemorrhoid szívó ligátor, amely bármikor azonnal alkalmazható. Nem szükséges tisztítani vagy fertőtleníteni. Egy kézzel is könnyen használható. A sebész kontrollálni tudja mind a proktoszkópot, mind pedig a ligátort, még asszisztencia nélkül is. Ez azt jelenti, hogy a KilRoiddal időt és költséget takarít meg.

A KilRoid-ot lehet videoendoszkópos proktoszkóppal is alkalmazni.

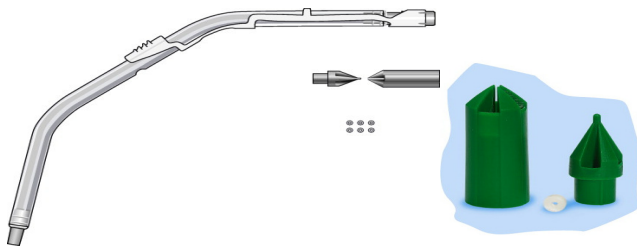

A KilRoid

- Kényelmes és tiszta, mindig használatra kész
- Időt lehet vele megtakarítani – nem kell fertőtleníteni, tisztítani
- Nem szükséges asszisztencia – egy kézzel is elvégezhető a beavatkozás, jól látható a beavatkozási terület, nagyobb precízitás
- Higiénikus – megvédi a beteget, az orvost és a kórházi személyzetet a fertőzésektől – használat után eldobható, így nincs keresztfertőzés
- Különleges feltöltő szerkezet – a gumigyűrűk feltöltése igen egyszerű
- Latexmenets gumigyűrűk – allergiás reakciók csökkennek

Rendelési szám és kiszárelés

Rend.sz. 67401

KilRoid 2 m csővel


30 db/doboz

Hogyan használjuk a KilRoid-ot?

Feltöltés

A ligáció megkezdése előtt a KilRoid-ot fel kell tölteni gumigyűrűvel. A feltöltés könnyen megy a különleges töltési megoldásnak köszönhetően.


1. Helyezze a töltő kúpot a KilRoid szívó végére. **Fontos: Ellenőrizze, hogy a töltő kúp és a szívóvég szorosan illeszkedjen egymáshoz és ne legyen rés közöttük.**

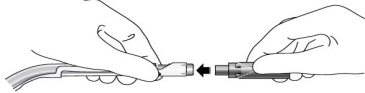

2. Helyezzen egy gumigyűrűt a töltő kúp hegyére




3. Helyezze a tágitó fejet szembe a töltő kúp hegyével és nyomja össze a kettőt. Ez kitágítja a szilikon gyűrűt és rácsúsztatja a töltő kúp aljára.

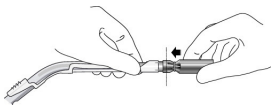

4. Húzza vissza a tágitót, majd forgassa el 180°-kal, úgy, hogy a nyitott fele nézzen a töltő kúp felé, és tolja le vele a szilikon gumigyűrűt az eszköz szívó végéhez.



5. Távolítsa el a töltő kúpot. A szilikon gyűrű most már a szívó végén helyezkedik el, és az eszköz használatra kész állapotban van.

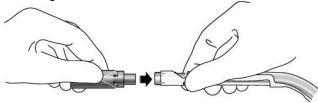

Használat

Feltöltött állapotban a KilRoid használatra kész. Mivel a KilRoid-ot egy kézzel is lehet használni, a sebész akár egyedül is elvégezheti a ligációt úgy, hogy egyik kezével a proktoszkópot, a másikkal pedig a ligátort fogja. Nem szükséges asszisztencia.


1. Csatlakoztassa a KilRoid-ot a szívókészülékhez.




2. A proktoszkóppal lokalizálja a haemorrhoidot. Az eszközt vezesse be a proktoszkópon át, hogy a haemorrhoid a szívóvéghez illeszkedjen.




3. Fogja be a szívásszabályozó nyílást és a készülék beszívja a haemorrhoidot.

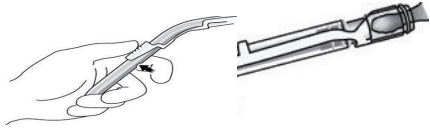

4. A kioldó szerkezet előre nyomásával a készülék „rálövi” a gyűrűt a haemorrhoid tövére.

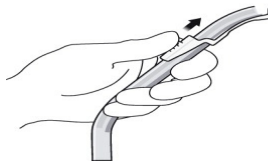

5. Miután leveszi az ujját a szíváserősség szabályozó nyílásáról a készüléket ki lehet húzni.

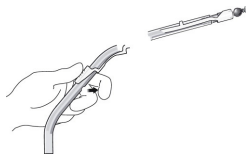

Ha a betegnél több haemorrhoid kezelésére van szükség, úgy a készüléket csak újra kell tölteni gumigyűrűvel és megismételni az eljárást. A beavatkozás elvégzése után az eszköz eldobható.

Forgalmazza:

Dispomedic Kft., 1105 Budapest, Gitár u.15.

Tel. (06-1)262-4227, 06/20-9414-785

Fax (06-1)262-4227, E-mail:info@dispomedic.hu