

**Pep/Rmt™**

**MINDEN LÉGVÉTELLEL EGYRE JOBB LESZ  
PEP/RMT maszk**



## PEP/RMT

### Négyféle légzésterápia egyetlen készülékkel

A PEP/RMT egy olyan könnyen használható szett, amellyel a betegek légzési teljesítménye fokozható. Különböző méretű maszkkal, ellenállások sorozatával és más opciókkal kiegészítve lehet hozzáigazítani a légzésizom tornához vagy a tünetek minimalizálásához. Otthon és kórházi körülmények között is jól alkalmazható.

A PEP/RMT maszkokat négy fő területen lehet használni.

- A páciens és a szakember is könnyen be tudja állítani és használni.
- Számos skálázási opció segíti Önt abban, hogy a páciens állapotának változásához tudja igazítani a paramétereket.
- Könnyen össze- és szétszerelhető
- Hatását dokumentumok igazolják



#### **PEP a csökkent tüdővolumen normalizálására.**

A PEP funkciót az immobilizáció, narkózis/műtét és neurológiai betegségek következtében fellépő csökkent tüdővolumen normalizálására lehet használni.





### **PEP a megnövekedett tüdővolumen normalizálására**

A PEP-et akkor is lehet használni, ha felesleges funkcionális reziduális kapacitást kell csökkenteni, amely az obstruktív tüdőbetegségek első stádiumában vagy súlyosbodása során lép fel.



### **Légzőizomtorna**

A korlátozott izomfunkcióval küzdő betegek esetében, amikor például krónikus obstruktív tüdőbetegségek (COPD) és különböző neurológiai megbetegedések fordulnak elő, az RMT funkciót a légzőizmok erejének és kitartásának fejlesztésére lehet használni. Az RMT másik felhasználási területe a szív-műtéten átesett betegek posztoperatív tüdőkomplikációinak csökkentése, valamint a sportolók teljesítőképességének növelése.



### **A váladékok eltávolításának megkönnyítése**

Fokozott váladékképződésnél, mint amilyen például a cisztás fibrózis és a krónikus obstruktív tüdőbetegségek, de súlyos fogyatékkal élők esetében is jól használható a PEP funkció.

Az ellenállásoknak köszönhetően a forszírozott légzés segíti a váladékok távozását.

