

A Sani-Cloth® Chlor egy olyan kettő az egyben tisztító és fertőtlenítő sporicid hatású kendő, amely ideálisan használható magas kockázatú, kontaminált környezetben.

*Sporicid, virucid, baktericid és yeasticid hatású 2 percen belül.*



### Ajánlott felhasználás:

- + Járvány kitörésének lehetősége és betegizolációs helyzetek
- + *C. diff* vagy más, ismert fertőzés igazolt vagy valószínűsíthető előfordulása
- + Minden felületre, a fiókos szekrényeket és a fürdőszobát is beleértve

### + Használatra kész

Előre nedvesített, alig szöszölő, eldobható fertőtlenítő kendő. Nem szükséges mérni és keverni a hozzávalókat.

### + Fokozott Hatékonyság

Ugyanaz a termék tisztít és fertőtlenít, így biztosítva a folyamatos és megbízható eredményt.

### + Optimális Védelem

Nem invazív orvosi eszközökre használható; nem porózus kemény felületekre ajánlott.

### + Igazolt hatékonyság

Teljes virucid és sporicid hatás 60 másodpercen belül az összes spórával szemben, beleértve a *C. difficilét* is.

### + Költséghatékony

Tisztít és fertőtlenít egyben, így időt és pénzt takaríthat meg.

### + A zéró karbonlábnyom

Az Egyesült Királyságban gyártják, így a szállítási lánc lerövidül és így csökken a karbonlábnyom.

## A termék hatékonysága

	Tesztmódszer	Organizmus	Behatási- idő	
Baktréumok	EN 16615	Pseudomonas aeruginosa	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Staphylococcus aureus	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 16615	Enterococcus hirae	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa	30 sec (c)	
	EN 13727	Staphylococcus aureus	30 sec (c)	
	EN 13727	Enterococcus hirae	30 sec (c)	
Élesztőgombák	EN 16615	Candida albicans	60 sec (c)	2 min (d)
	EN 13624	Candida albicans	30 sec (c)	
	EN 13624	Candida auris	30 sec (c)	
Burkos vírusok	EN 14476	Vaccinia Virus	30 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Corona,HIV, Hep & C, SARS, Flu	30 sec (c)	60 sec (d)
Nem burkos vírusok	EN 14476	Norovirus	60 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Adenovirus	60 sec (c)	60 sec (d)
	EN 14476	Poliovirus	60 sec (c)	60 sec (d)
Spórák	EN 16615	C.Difficile	60 sec (c)	

\*Tiszta körülmények (c) Szennyezett körülmények (d)

## A termék részletei

Kiszerezés	Kendőméret	Kendő darabszám	DB/ ktn.	Besorolás	Termékkód
50 db-os Nagy tartály	200mm x 195mm	50	6	MD Class IIa	ECH1400

## Kiegészítő termékek



Tartályrögzítő  
falra és rúdra



"I Am Clean"  
öntapadós felirat és  
szalag



Használati utasítás poszterek,  
videók, termékválasztást segítő  
táblázatok és rövid ismertető



További információért forduljon hozzánk: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu)

T: + 36 1 262 4227

E: [info@dispomedic.hu](mailto:info@dispomedic.hu)

W: [dispomedic.hu](http://dispomedic.hu)

PDI International