

clinell®

www.dispomedic.hu

2 perc alatt
pusztítja el
a spórák legalább

99,9999%-át

CLINELL SPORICIDAL TÖRLŐKENDŐK

A KLINIKAILAG LEGJOBBAN BEVIZSGÁLT FERTŐTLENÍTŐ KENDŐ A VILÁGON

Hatékony a száraz biofilm ellen

A Clinell Sporicidal törlőkendők hatékonyan eltávolítják a száraz biofilm kórokozóit, valamint megakadályozzák az átvitelüket és a regenerációjukat.

Biztonságos és könnyen használható

A száraz kendőben lévő poralakú anyagot vízzel lehet aktiválni, így nem fordul elő hígítási hiba. Aktiválásakor nem keletkeznek mérgező gőzök, így biztonságosan használhatók betegek mellett.

Klinikailag legjobban vizsgált törlőkendő

A Clinell Sporicidal törlőkendők nem szelektív hatással pusztítják el a legtöbb ismert patogén mikroorganizmust. Bizonyítottan 6 log spóraszám csökkentéssel, szennyezett körülmények között is 2 perc alatt, bizonyítottan felülmúlja a többi vezető sporocid törlőkendőt.

Gyors és hatékony erősen szennyezett körülmények között is

Hatékonyabb, mint a klórral történő kétlépcsős tisztítás és fertőtlenítés. Lehetővé teszi mind a tisztítást, mind a fertőtlenítést és hatékony marad erősen szennyezett körülmények között is, ellentétben a klór alapú termékekkel.

Kompatibilis a legtöbb felülettel

A közel semleges pH-jú Clinell Sporicidal törlőkendők korrózió mentesen használhatók a legtöbb nem-invazív orvostechikai eszközön és berendezésen.

Szabadalmaztatott formula

A Clinell Sporicidal törlőkendők CE tanúsítvánnyal rendelkező, IIa osztályba tartozó orvostechikai eszközök, amelyek egyedi porkombinációt tartalmaznak, hogy igény szerint peracetsavat képezzenek víz hozzáadásával.

MIÉRT VÁLASSZA A CLINELL SPORICIDAL TÖRLŐKENDŐT?

A helyiségek felületeinek tökéletesített tisztítása és fertőtlenítése csökkenti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatát.

Hatékony sporocid szerek

Indokolt a *C. difficile* baktériummal fertőződött betegeket ellátó helyiségek környezetének sporocid termékekkel való fokozott tisztítása. A *C. difficile* baktérium átvitel megelőzésének kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik a kórházi helyiségek felületeinek napi és a beteg elbocsátásakor történő megfelelő tisztítása és fertőtlenítése. A *C. difficile*-vel fertőzött területek hatékony fertőtlenítéséhez elengedhetetlen a sporocid termék használata és a megfelelő gyakorlat.

SPOROCID HATÁS ÉS ANTI-BIOFILM


A kvaternális ammónium vegyületeket sporisztikusnak nevezik, ami azt jelenti, hogy csak a spórák csírázását és/vagy szaporodását gátolják. A Clinell Sporocidal törlőkendők oxidálószer, perecetsavat hoznak létre, amely egy jól ismert sporocid szer. A Clinell Sporocidal törlőkendők a száraz biofilmek ellen is hatékonyak bizonyulnak.

TOXIKOLÓGIAI VESZÉLYEK


A tablettákból és porokból készült klórolatok veszélyesek a felhasználóra és a betegekre egyaránt: mérgező gázokat és melléktermékeket bocsátanak ki. Kimutatták, hogy a klór légúti-, orr-, bőr- és szempanaszokat okoz.

A KLÓR HATÁSTALAN


Az egylépéses fertőtlenítő kendők hatékonyabbak, mint a kétlépésű tisztítás és fertőtlenítés klórral. Klóroldat készítésekor a koncentráció esetleg nem megfelelő, ami gyenge és hatástalan fertőtlenítőszer eredményezhet, valamint mérgező a személyzetre, a betegekre és az anyagokra.

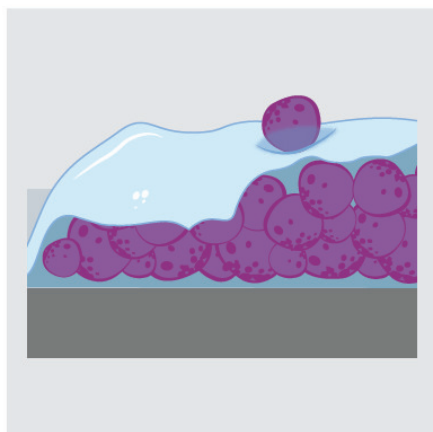

A biofilm képződés védelmet és tápanyagot biztosít a mikroorganizmusok számára, lehetővé téve számukra az ellenséges környezetben való túlélést.

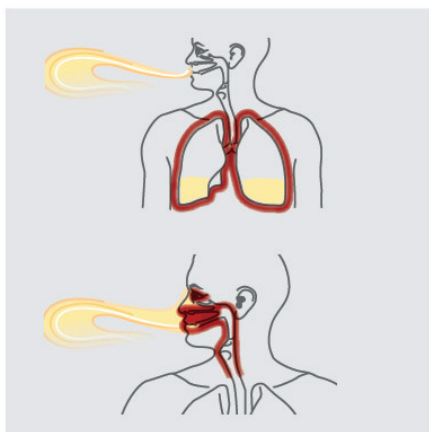

A klórgáz tüdőkárosodást, szem irritációt, orr- és torokkárosodást, köhögést és légszomjat okoz.

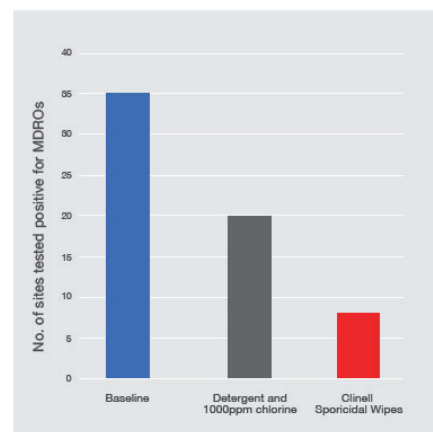

A Clinell Sporocidal törlőkendők hatékonyabban csökkentik a többszörösen gyógyszerrezisztens organizmusok jelenlétét, mint a kétlépésű tisztítás és fertőtlenítés klórral.

A klór tartós belélegzése megnövelheti a tüdőfibrózis kockázatát

Bizonyítottan 72%-kal csökkenti a *C.difficile* baktériummal összefüggő betegségeket

Percetsavat generáló törlőkendők vízzel aktiválva, felületfertőtlenítéshez és nem-invazív orvosi eszközök tisztításához.



Clinell Sporidical törlőkendők

A szabadalmaztatott technológiát tartalmazó törlőkendőket nem-invazív orvosi eszközök minden felületén történő használatra tervezték. Vízzel történő aktiváláskor a percetsav szintje olyan, amely bizonyítottan elpusztítja a legtöbb mikroorganizmust, beleértve a száraz biofilm kórokozóit is.

A Clinell Sporidical törlőkendők magas minőségi tulajdonságokkal rendelkező fertőtlenítőkendők, amelyek rendkívül hatékonyak a *C. difficile* spórák ellen. Tisztítanak és fertőtlenítenek, hatékonyabb és biztonságosabb alternatívát kínálva a kétlépcsős mosószeres tisztításnak, amelyet klóroldattal végzett fertőtlenítés követ.


ANTIMIKROBIÁLIS AKTIVITÁS

Erőteljes fertőtlenítő készítmény pH optimalizált percetsav és hidrogén-peroxid kombinációval, nátrium-perkarbonáttól és tetra-acetil-etilén-diaminból.


Nagy teljesítményű oxidatív ölő hatás minden mikroorganizmussal szemben, beleértve a nem burkos vírusokat, bakteriális endospórákat és a száraz biofilmet.

Megfelel az EN1276, EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, EN14562, EN14563 és az EN16615 irányelveknek.

BAKTÉRIUMOK	TESZT	BEHATÁSI IDŐ
Acinetobacter baumannii	EN13727	10 sec
Escherichia coli	EN13727	10 sec
Pseudomonas aeruginosa	EN13727	10 sec
	EN1456	11 min
Staphylococcus aureus	EN13727	10 sec
	EN14561	1 min
Enterococcus hirae	EN13727	10 sec
	EN14561	1 min
Klebsiella pneumoniae (ESBL)	EN13727	10 sec
Enterococcus faecalis	ASTM E2967-15	10 sec
Dry Biofilms		Wiping 10 sec, contact 2 min
SPÓRÁK		
Clostridium difficile	EN13704	2 min
	ASTM E2362-09	2 min
Bacillus subtilis	EN13704	2 min
MYCOBAKTÉRIUMOK		
Mycobacterium terrae	EN14348	2 min
Mycobacterium avium	EN14348	2 min
GOMBÁK		
Candida auris	EN13624	10 sec
VÍRUSOK		
Adenovirus	EN14476	1 min
Human coronavirus (MERS-CoV)	EN14476	1 min
Canine parvovirus	EN14675	2 min

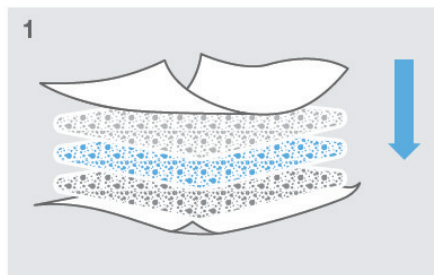

1 A törlőkendő aktiválás előtt száraz. Minden törlőkendő két réteg nem szőtt anyagból áll, amelyek a középső rétegben egyedi porkombinációval vannak összekötve.

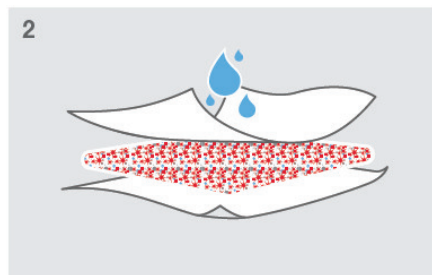

2 A víz aktiválja a port, ezáltal magas hidrogén-peroxid és percetsav szintet hozva létre.



3 Az egyedülálló alkalmazási mód egyenes hatásos hatékonyt biztosít, higítási hibák nélkül.

TEREMÉK	KISZERELÉS	RENDELÉSI KÓD
Clinell Sporidical Törlőkendő	25 db kendő/csomag	CS25

CE 0050

CE TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ, IIA OSZTÁLYBA TARTÓZÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK

HASZNÁLJA A FERTŐTLENÍTŐKET BIZTONSÁGOSAN. HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A TERMÉKLEÍRÁST. MINDIG KÖVESSE AZ ORVOSI ESZKÖZÖKET GYÁRTÓ CEKÉK TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓIT ÉS IRÁNYELVEIT.

Gyártja
GAMA Healthcare Ltd.

The Maylands Building, Mayland Avenue,
Hemel Hempstead Industrial Estate,
Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TG UK

gama
healthcare

Forgalmazza
Dispomedic Kft.

1105 Budapest, Gitár u. 15.
Tel: +36 1 262 4227, +36 20 941 4688, +36 20 941 4785
E-mail: info@dispomedic.hu Web: www.dispomedic.hu

DISPOMEDIC
EGÉSZSÉGVÉDELMI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK